





SAFETEC GOLD

BRUKSANVISNING

PLAST
DEKSEL

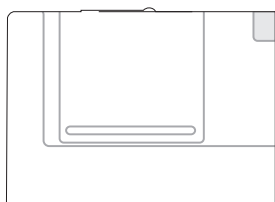


PIERCING
KASSETT

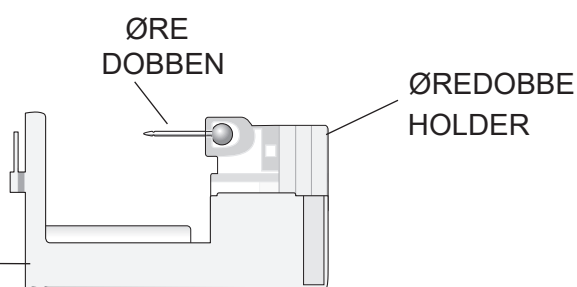


KASSETT KANAL

HÅNDTAK


SIKKERHETSLÅS

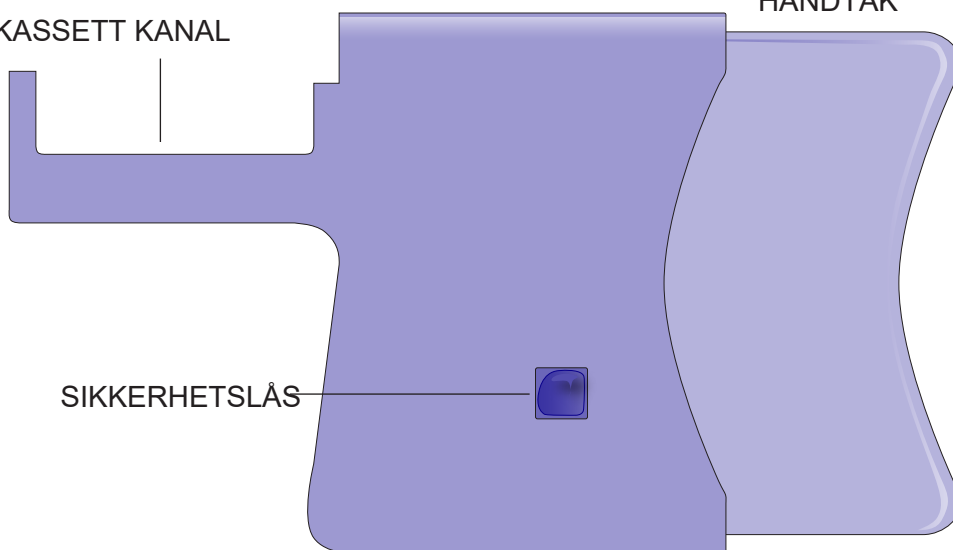



SYSTEM KOMPONENTER

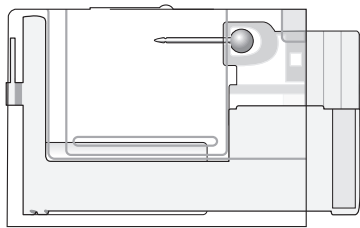

1. TA EN ØREDOBBEKASSETT UT AV ESKEN OG FJERN PAPIRET PÅ SELVE KASSETTEN. PLASSER KASSETTEN I KASSETTKANALEN PÅ INSTRUMENTET OG SØRG FOR AT DEN SITTE GODT PÅ Plass I RIKTIG POSISJON.

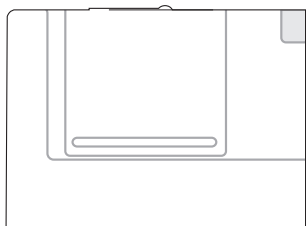

3. FJERN NÅ PLASTDEKSLET FRA KASSETTEN VED Å LØFTE DET DIREKTE OPP.

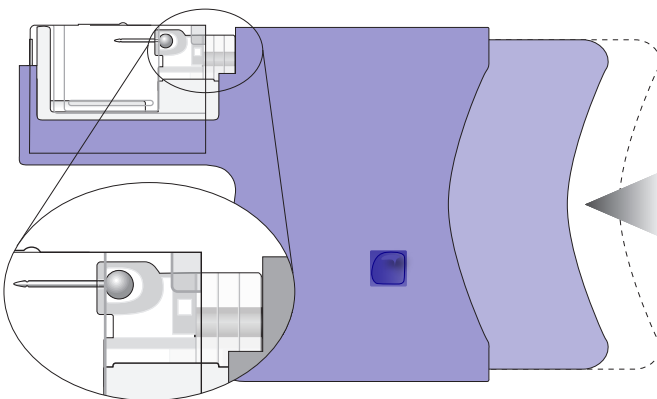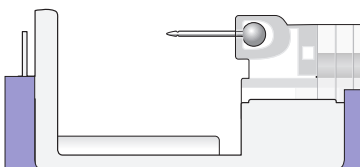


2. KLEM FORSIKTIG INN HÅNDTAKET TIL DU SER SPISEN PÅ DOBBEN OG SIKKERHETSKNAPPEN KLIKKER I INNKOBLINGSSTILLING.




4. PLASSER INSTRUMENTET TIL DET STEDET SOM ER MARKERT PÅ ØRET OG FORTSETT Å PRESSE HÅNDTAKET FORSIKTIG TIL SPISEN PÅ DOBBEN MØTER MERKET PÅ ØRET.


4 B. SIKRE AT POSISJONEN ER RIKTIG OG PRESS SÅ HÅNDTAKET GODT SAMMEN FOR Å STIKKE HULL I ØRET

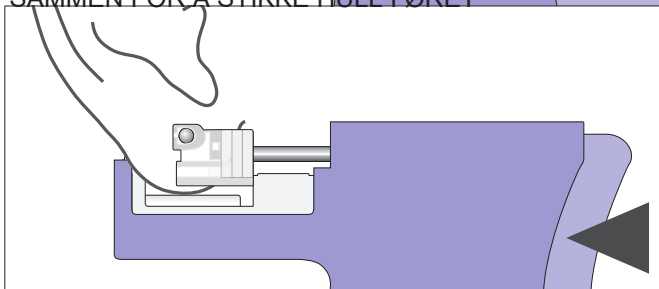

5. NÅ LÅSEN NÅ ER FESTET, (1) SLIPPER DU HÅNDTAKET FORSIKTIG (2) FJERN INSTRUMENTET I EN NEDADGÅENDE BEVEGELSE OG BORT FRA ØRET.

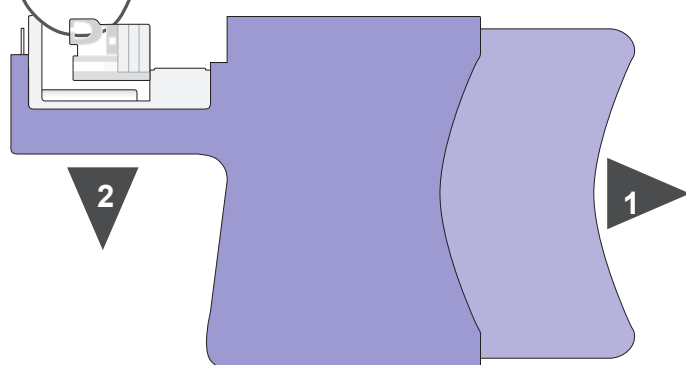

NÅR HÅNDTAKET SLIPPESS, VIL ØREDOBBEHOLDEREN DELES OG FRIGJØRE ØREDOBBEN.

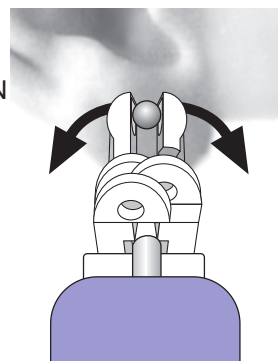

6. VED Å TRYKKE PÅ SIKKERHETSKNAPPEN KAN DU NÅ FJERNE KASSETTEN FRA INSTRUMENTET.

